

検査部 通信

採血管の払い出しについて (場所と時間)

企画：
中央臨床検査部

NO.9

検体採取容器の払い出し場所は、院内検査と外注検査で異なります。

- ① 院内検査 → SPD (2F)
- ② 外注 (SRL、BML、LSI、盛臨、その他) → 採血室 (2F)

POINT!



採取容器一覧表（検体ラベル詳細、採血記号、外注先等を記載）
を準備しています。
定期的に更新し、各部署へ配布しております。
不足時は検査部へ問合せください。

※採取容器一覧表より抜粋



採取量

採取容器
外注先 など

採血量と容器を
確認してください

■ 外注検査用採血管

- ◎ 外注検査用採取容器、外注検査用伝票、酸性ユリメジャー（酸性蓄尿用）、尿中Cペプチド安定化剤は **中央採血室** からの払い出しとなります。
（原則、定時内のみ の対応となります。在庫確認は定時内をお願いします。）
- ◎ 定時外は **緊急の場合のみ** 払い出しに対応します。検体検査室（内線 3301）にご相談ください。
- ◎ 採取容器には使用期限があります。期限切れには十分注意してください。

共通		SRL						
容器記号	(血清)	PN7	PAC	PN5	PAP	PH5	PH9	PSF
ラベル	容器 81	容器 2	容器 3	容器 4	容器 5	容器 6	容器 7	容器 8
外観								
		ラベル無	PAIgG			ラベル無	ラベル無	
内容	凝固促進剤＋分離剤	EDTA-2Na	ACD-A保存液	EDTA-2Na	アプロチニン＋EDTA-2Na	ヘパリンNa	ヘパリンNa	EDTA-2K＋分離剤
採血量	5 mL	7 mL	7.5 mL	5 mL	3 mL	5 mL	10 mL	5 mL
備考		院内細菌検査でも使用 (フィブリン析出防止)	採取量厳守					採血量厳守 開封厳禁

外注容器は、外注容器請求票を使用することで
効率的な払い出しが可能です。

外注容器請求票

請求の流れ


請求票*を
採血室受付へ提出
10:00までに

*2F採血室に準備してあります。

直接手渡し
(採血室受付)
14時以降

トレーライナー
午前便または午後便

その他の時間帯は
採血室にトレーライナーの
接続がないために対応が出来ません
直接取りに来ていただくように
お願いいたします

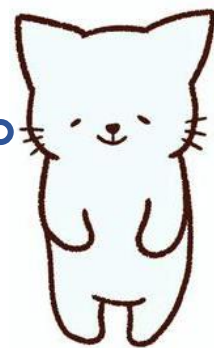

ご協力
お願いします

トレーライナー		窓口		
外注容器請求票		請求元	10時までに採血室受付に提出して 下さい。14時以降は提出できません。	
検査No.	品名	製品番号		請求数
2	EDTA-2Na 7mL			
4	EDTA-2Na 5mL			
9	3.2% citrate 4.5mL			急凍内保存
19	A・J・J 1st II AK リットリム 10mL			
6	A・J・J 1st II AK リットリム 5mL			
3	オプティマ (PAIgG) 5mL (ACD-A 液入)			7/8 2倍検
5	オプティマ (7/8 0.5%)			7/8 2倍検
13	インビトロ E AK リットリム (1.5% トロポ)			検体検
8	HIV-1 RNA 容器 血漿 5mL 白+黄			検体検
10	グロブリン 5mL (HCV-RNA)			検体検
16	酸素白濁 乳酸 5mL (8% 2mL 入)			冷蔵保存
	オプティマ (NK細胞活性)			PNK 7/8 2倍検
	オプティマ β-TG 2.7mL + 採血時冷却			PGT 7/8 2倍検
	インビトロ SQ 3mL (7/8 2.0mL)			SZZ
	HPV リットリム (1.5% トロポ) 一般用 (1.5% トロポ)			V10 一般用・2倍検
	APTIMA STD 207 採取キット 男女兼用			V10 一般用・2倍検
	インビトロ FEN 検体抽出キット (1.5% トロポ)			V10 一般用・2倍検
	クオンティファロン (QFT)			V10 一般用・2倍検
	ウイルス用保存液			V10 冷蔵保存
	骨髄液 リンパ節用			H20 凍結保存 使用時検定
	リンパ節用 (7/8 0.5%)			H20 凍結保存 使用時検定
	OTS・盛岡 S・外科研究用・泌尿器研究用			ガラス製

使用期限に注意して必要本数のみ
できる限り平日 16:30までの
請求と受け取りに
ご協力お願いします。

問い合わせ先：中央採血室（3201）